

# AROSHA

LX9



EN ISO 13485



**OS MAREF**  
DAESUNG MAREF CO.,LTD.

Bedienungsanleitung

DE

# Inhalt

<b>1. Einleitung</b>	<b>3</b>
1.1 Einführung	3
1.2 Warnzeichen	3
<b>2. Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
2.1 Elektrische Sicherheitshinweise	4
2.2 Informationen über die Manschetten	5
2.3 Für die eigene Sicherheit	6
2.4 Gebrauch und Unterhalt	7
2.5 Reinigung und Pflege	7
<b>3. Gerätebeschreibung</b>	<b>8</b>
3.1 Technische Daten	9
3.2 Klausel 5	9
<b>4. Zubehör</b>	<b>10</b>
4.1 Zubehör Basic Set & Drainage Set	10
<b>5. Gebrauchsanweisung Gerät</b>	<b>11</b>
5.1 Eigenschaften	11
5.2 Hinweise für die erste Anwendung	12
5.3 Einstellen des Druck-, Zeit- und Intensitätsbereichs	12
5.4 Einstellen der Programme	13
5.5 Auswählen der einzelnen Druckkammern	14
5.6 Verbinden der Anschlusskabel mit dem Steuergerät	14
5.7 Verbinden der Anschlusskabel mit den Manschetten	14
<b>6. Gebrauchsanweisung Zubehör</b>	<b>15</b>
6.1 Anwenden der Manschetten	15
6.2 Anlegen der Bauch-/Hüftmanschette	16
<b>7. Interferenzen</b>	<b>17</b>
7.1 Informationen über mögliche elektromagnetische Störungen	17
7.2 WEEE Kennzeichnung	18
7.3 Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen	18
7.4 Abbruch der Behandlung	19
7.5 Empfehlung	19
<b>8. Fehler</b>	<b>20</b>
8.1 Fehlerdiagnose	
<b>9. Garantie</b>	<b>21</b>
<b>10. Anwendungsprotokoll (Übersicht)</b>	<b>22</b>

## 1.1 Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Gerät ist ein Kompressionstherapiesystem, das durch das Aufblasen und Entleeren von Luftkammern, die Blutzirkulation fördert.





Es ist für den Heimtherapieeinsatz sowie zur Verwendung in medizinischen Einrichtungen gedacht.

### Funktionsprinzip

Es werden nacheinander alle Druckluftkammern so lange mit Luft gefüllt, bis der gewünschte Anpressdruck erreicht ist. Ist dieser erreicht, werden die Druckkammern wieder entleert und der Vorgang beginnt erneut.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Anweisungen für eine sichere und richtige Anwendung des Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

## 1.2 Warnzeichen

 Warnung	Bei Missachtung können Verletzungen, Beschädigungen, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes auftreten.
 Warnung	Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder sogar Lebensgefahr.
 Verbot	Verbotene Handlung.
 Demontieren verboten	Reparatur/Umbau/Demontage sind untersagt. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen mit der Folge von Verletzungen oder Kurzschluss kommen.

## 2. Sicherheitshinweise

### 2.1 Elektrische Sicherheitshinweise



Verbot

- Versichern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Gerätespannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Das elektrische Leitungsnetz muss mit einer wirksamen Erdung versehen sein und die Installation muss allen einschlägigen Vorschriften entsprechen (ansonsten besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages).
- Treten während des Gebrauchs Anomalitäten (Heisswerden, Verbrennungsgeruch usw.) auf, schalten Sie das Gerät aus, verwenden es nicht mehr und setzen sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Ziehen Sie nie am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen. Fassen Sie immer direkt am Netzstecker an.
- Berühren Sie den Stecker nie mit nassen Händen (Stromschlaggefahr).
- Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen (Brandgefahr, Stromschlag).
- Berühren Sie keinen Stecker oder Anschluss zur gleichen Zeit wie der Patient.

**Peripheriegeräte müssen den Standardnormen der IEC (z.B. IEC 60950 für IT-Ausrüstung und IEC60601-1 für elektrische und medizinische Geräte) entsprechen. Darüber hinaus müssen solche Kombinationssysteme in Übereinstimmung mit der Norm IEC60601-1 und/oder IEC60601-1-1 der harmonisierten nationalen Norm sein.**

Sollten Sie irgendwelche Zweifel haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder Ihren lokalen Vertreter.



Achtung

Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und Reinigung des Gerätes sowie bei Gewittern (Blitz, Donner) um Elektro- und andere Unfälle zu vermeiden.

## 2.2 Informationen über die Manschetten



Verbot

- Benutzen Sie die Manschetten nicht auf nackter Haut. Verwenden Sie idealerweise Hygieneanzüge. Durch Einwirkung von Schweiß, Talg und Kosmetika kann die Lebensdauer der Manschetten beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie keine anderen Teile um die Manschetten aufzublasen, als das mit dem Gerät mitgelieferte Originalzubehör.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Mittel, Öle, Benzin, Alkohol und ähnliche Stoffe.



Achtung

- Legen Sie Schmuck, Uhren etc. ab bevor Sie die Manschetten anlegen (mögliche Beschädigung der Manschette durch spitze Gegenstände).
- Lagern Sie die Manschetten nicht in der Nähe von Hitzequellen (durch Hitzeeinwirkung können die Manschetten beschädigt werden).
- Vermeiden Sie während der Anwendung das Tragen und Verwenden von spitzen Gegenständen wie Nadeln, Scheren ect. (mögliche Beschädigung der Manschetten).

## 2.3 Für die eigene Sicherheit



Verbot




- Es ist verboten, das Gerät unter Alkoholeinfluss zu benutzen.






Warnung

- Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Beim Befüllen der Manschetten mit Luft können ernsthafte Verletzungen entstehen.
- Verwenden Sie die Manschetten nur an den vorgesehenen Körperteilen. Bei Missachtung besteht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Patienten mit einem künstlichen Herzen.
- Verwenden Sie die Manschetten nur in geschlossenem Zustand. Bei Der Verwendung von offenen oder nicht richtig geschlossenen Manschetten können Verletzungen der Haut auftreten.
- Vermeiden Sie die Anwendung bei Patienten mit Transplantaten oder Implantaten wie künstliche Gelenke, Metallprothesen oder Sillikon-implantaten. Diese können Entzündungen und andere Nebenwirkungen hervorrufen.
- In folgenden Fällen verwenden Sie das Gerät bitte nur nach Zustimmung des Arztes: Lymphödeme, Venenerkrankungen, Herzkrankheiten, Gefäßkrankheiten, Gangrän, Patienten mit Krebstherapie, Wundbrand, Patienten mit kürzlicher Hauttransplantation, Venenthrombose, nach Operationen (vor allem der inneren Organe, des Nervensystems und des Gehirns).
- Verwenden Sie das Gerät nur nach Rücksprache mit dem Arzt bei Herzerkrankungen, Bluthochdruck, bösartigen Tumoren, akuten entzündeten Hautkrankheiten, hohem Fieber.
- Brechen Sie die Anwendung ab, falls Sie während der Behandlung Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.

## 2.4 Gebrauch und Unterhalt

 Verbot	<ul style="list-style-type: none"><li>- Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen und bei Temperaturen zwischen 0-40°C (Missachtung kann die Funktion beeinträchtigen).</li><li>- Setzen Sie die Manschetten und das Steuergerät keiner längerer Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen (z.B. Entlüfter oder Heizkörper) aus. Missachtung kann Schäden an den Manschetten (Verformungen, Ausfallrisiko, Feuer) verursachen.</li><li>- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.</li></ul>
 Warnung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit (Sauna, Bad etc.). Fehlfunktionen, Brand- und Stromschlaggefahr möglich.</li></ul>
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwenden Sie das Gerät auf einem horizontalen, ebenen, stabilen Platz (Missachtung kann eine Fehlfunktion verursachen).</li></ul>

## 2.5 Reinigung und Pflege

 Verbot	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwenden Sie zur Reinigung des Steuergerätes und der Bandagen keine chemischen Mittel, Öle, Benzin, Alkohol und ähnliche Stoffe. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch. Hartnäckige Flecken mit einem feuchten Tuch mit einer Lösung aus Wasser und milder Seife entfernen. Vor Wiedergebrauch vollständig trocknen lassen.</li></ul>
 Warnung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stecken Sie keine fremden/spitzen Gegenstände in die Luftdrucköffnung des Gerätes. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden und es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen und Überhitzung. *Informieren Sie den Techniker wenn eine Fehlfunktion am Gerät auftritt.</li></ul>
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"><li>- Versuchen Sie niemals das Gerät selber zu öffnen und Reparaturen durchzuführen (Gefahr von Brand und Stromschlag).</li></ul>

# 3. Gerätebeschreibung

## Druckgeschwindigkeit

Anzeige für die Druckgeschwindigkeit

## Zeitsteuerung

Anzeige für die Zeitdauer

## Anpressdruck

Anzeige für den Druckbereich

## Auswahl der Druckkammern

Auswahl der einzelnen Druckkammern

## Programmwahlwechsler

Wählen Sie die Programme (A, B, C, D)



## Steuerungsrad

Steuerungsrad für die verschiedenen Einstellungen

## Start /Stop

Startet und stoppt die laufende Anwendung

## Einschalten/ Ausschalten



## 3.1 Technische Daten



Spannung/ Frequenz	AC 230 V, 50/60 Hz	Gewicht	2 kg (verpackt 6.5 kg)
Zeiteinstellung	5~90 Min.	Produktabmessung	260 x 160 x 120 mm
Anpressdruck	10 ~180 mmHg $\pm$ 20 mmHg	Sicherung	50 VA

## 3.2 Klausel 5

1. Schutzart gegen Elektroschlag: Schutzklasse II
2. Anwendungsklasse: nicht eingestuft – angewendet BF Teile
3. Schutzgrad des Gehäuses gegen Berührung, Fremdkörper und Wasser: IPX0, gewöhnliche Ausrüstung
4. Nicht in der Nähe von entflammaren Stoffen einsetzen.
5. Gerät ausgelegt für: kontinuierlichen Betrieb

# 4. Zubehör

## 4.1 Zubehör Basic Set & Drainage Set

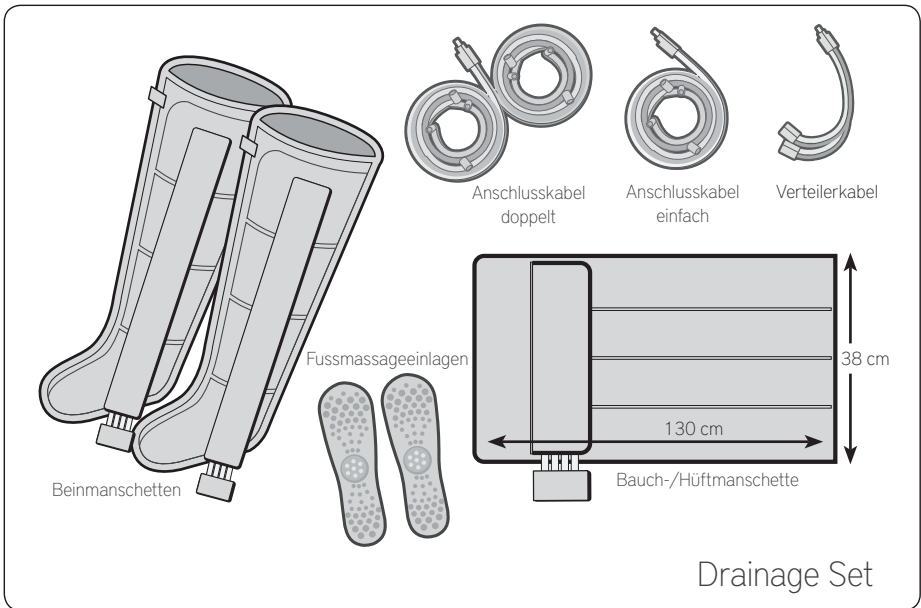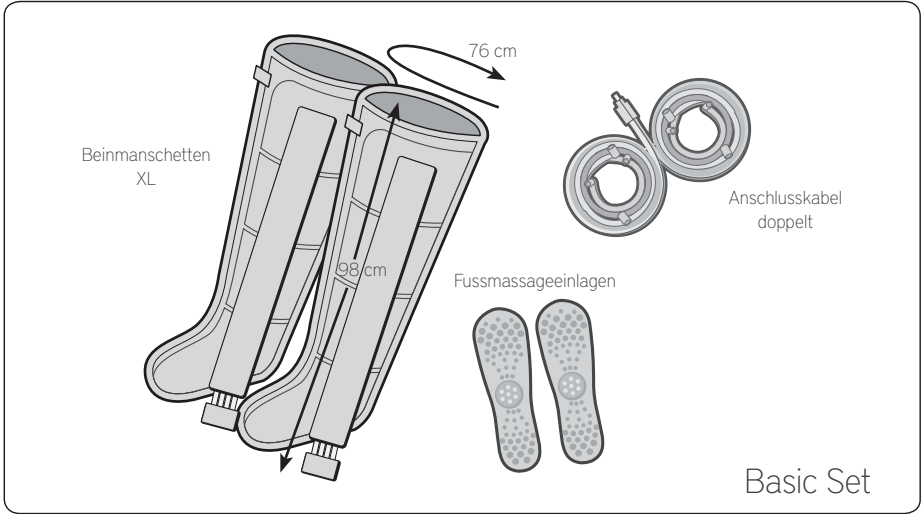

### 1. 4 Programmeinstellungen

Das Steuergerät verfügt über 4 voreingestellte Anwendungsprogramme (A,B,C,D).

### 2. Ansteuerung einzelner Druckkammern

Bei der Anwendung kann jede Druckkammer einzeln angewählt werden. Dies ist besonders hilfreich wenn z.B. eine einzelne Druckkammer aufgrund einer Wunde/Krankheit übersprungen werden muss.

### 3. Druckgeschwindigkeit

Der Anwender kann wählen wie schnell sich der Anpressdruck aufbaut. Das Steuergerät besitzt eine 6fache Abstufung, Level 1-6.

### 4. Touchscreen-Einstellung

Der Anwender kann sehr einfach zwischen verschiedenen Einstellungen wählen.

### 5. Drucksensorsteuerung

Die Anzeige über den Druckbereich wird digital angezeigt. Der Drucksensor pumpt immer konstant, unabhängig der Körperfülle.

### 6. Zeitsteuerung

Mit der digitalen Zeitanzeige kann die Anwendungsdauer sehr einfach eingestellt werden.

### 7. Sicherheitsfunktion

Sollte eine plötzliche Stromunterbrechung auftreten, werden die Druckkammern automatisch entlastet und die Luft entweicht.

### 8. Steuerwahlschalter

Besonders einfache Einstellung von Zeit, Druck und Programmen über einen Wählschalter.

## 5.2 Hinweise für die erste Anwendung

### 1. Einstellung Anpressdruck

Es kann zu Verletzungen führen wenn Sie bei der ersten Anwendung einen zu hohen Druck einstellen. Beginnen Sie mit 20-30 mmHg und erhöhen Sie dann nach und nach.

### 2. Verwenden der Beinmanschetten

Führen Sie die Anwendung nur mit gestrecktem Bein durch. Die Anwendung mit angewinkeltm Bein kann zu Schmerzen im Kniebereich führen.

### 3. Verwenden der Bauch-/Hüftmanschette


Legen Sie die Bauch-/Hüftmanschette in dem Bereich den Sie behandeln möchten, korrekt an (Bauch, Taille, Hüfte, Oberschenkel). Die Anwendung nur im Taillenbereich kann möglicherweise Schmerzen im Unterleib verursachen.

### 4. Verwenden der Anschlüsse

Verwenden Sie das einfache Anschlusskabel für eine Manschette, das doppelte Anschlusskabel für 2 Manschetten und das Verteilerkabel zusammen mit dem einfachen und dem doppelten Anschlusskabel für 3 Manschetten.

## 5.3 Einstellen des Druck-, Zeit- und Intensitätsbereichs


- Einstellung Druckbereich: 10~180 mmHg
- Einstellung Anwendungsdauer: 5~90 Minuten
- Druckgeschwindigkeit: 1~6 mL/s

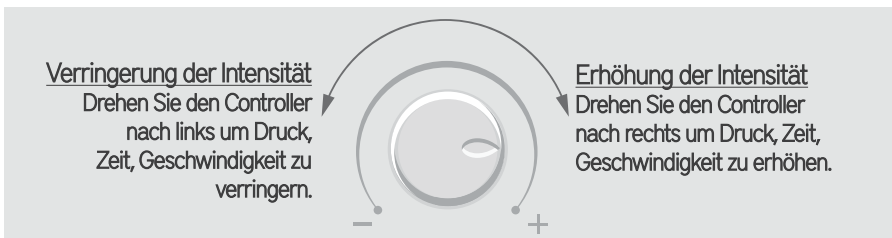



- Der Drucksensor erkennt automatisch die Druckeinstellung und wechselt zur nächsten Kammer.
- Prüfen Sie die Manschetten auf einen Defekt, wenn der Druck geringer ist als der eingestellte Druck.
- Wenn die Manschette ein Leck hat oder vom Druckluftkabel getrennt ist, presst der Sensor ca. 90 Sek. und wechselt dann zur nächsten Kammer.
- Es wird empfohlen mit dem niedrigsten Druck zu beginnen und ihn dann entsprechend Ihrer Körperkondition zu regeln.

## 5.4 Einstellen der Programme


Das Gerät besitzt 4 automatische Programme.

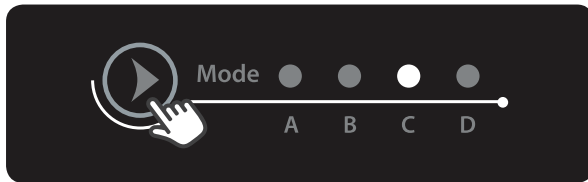

Drücken Sie die Taste „Mode“ um die einzelnen Programme auszuwählen.

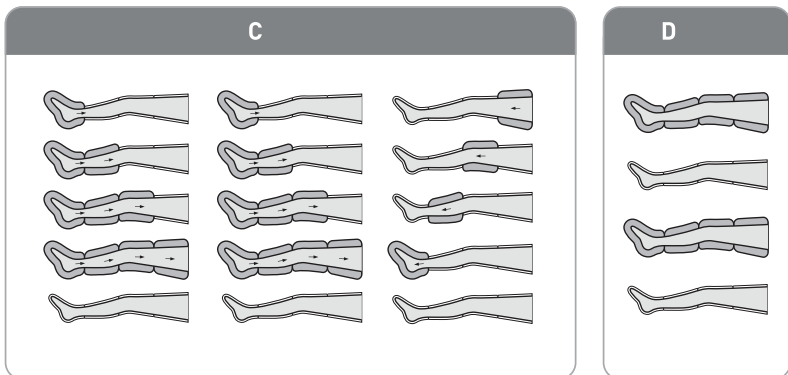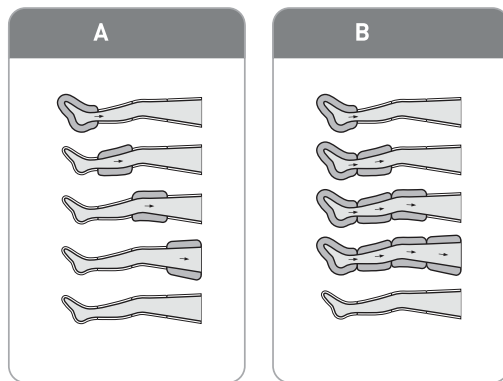

## 5.5 Auswählen der einzelnen Druckkammern

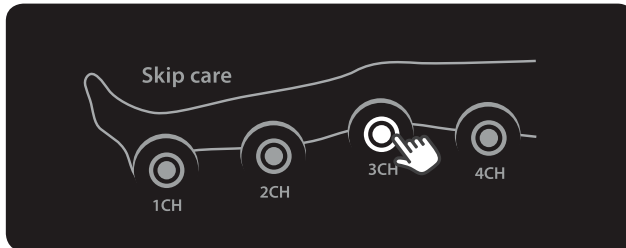

Sie können jede einzelne Kammer auswählen und gegebenenfalls abschalten. Die Kammern können auch während des Betriebes ausgewählt werden.

## 5.6 Verbinden der Anschlusskabel mit dem Steuergerät



- Schliessen Sie den Stecker des Anschlusskabels ans Steuergerät an (siehe Abb.)
- Prüfen Sie den Stecker auf eine sichere Verbindung.

## 5.7 Verbinden der Anschlusskabel mit den Manschetten

Verbinden Sie das Anschlusskabel mit den Manschetten.

### \* Reihenfolge

- Beinmanschetten : Fuss > Waden > Knie > Hüfte
- Bauchmanschetten : Bauch > Hüfte > Becken > Hüfte

# 6. Gebrauchsanweisung Zubehör

## 6.1 Anwenden der Manschetten

### Anwenden einer Manschette

- Legen Sie eine Manschette korrekt an und verbinden Sie diese mittels dem einfachen Anschlusskabel mit dem Steuergerät.



### Anwenden von 2 Manschetten gleichzeitig

- Legen Sie beide Manschetten korrekt an und verbinden Sie diese mittels dem doppelten Anschlusskabel mit dem Steuergerät.
- Überprüfen Sie die Steckverbindungen auf korrekten Anschluss.



### Anwenden von 3 Manschetten gleichzeitig


- Legen Sie die drei Manschetten korrekt an und verbinden Sie diese mittels dem Verteilerkabel zusammen mit dem einfachen und dem doppelten Anschlusskabel mit dem Steuergerät.
- Überprüfen Sie die Steckverbindungen auf korrekten Anschluss.



## 6.2 Anlegen der Bauch-/Hüftmanschette

### 1. Anlegen

Für die richtige Anwendung der Manschette achten Sie darauf, dass diese sich mittig um die Hüfte befindet. Nur so ist eine richtige Kompression gewährleistet.

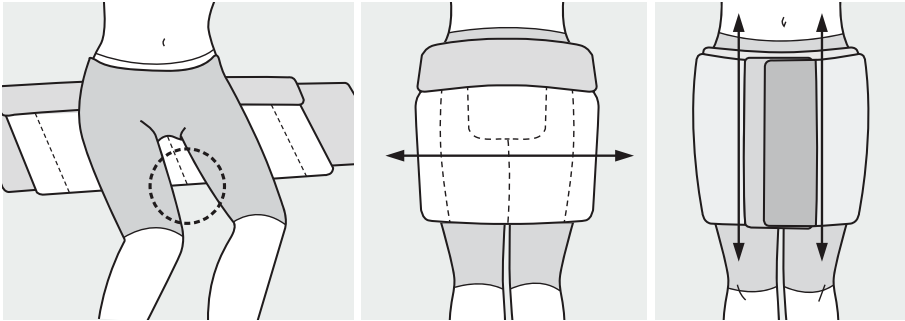

Achten Sie darauf die  
Manschette mittig anzulegen.

Kontrollieren Sie ob die Manschette korrekt angelegt ist.

### 2. Verbinden

Verbinden Sie die Manschette mit dem einfachen Anschlusskabel nachdem sie angelegt wurde.

### 3. Betrieb

Für die erste Anwendung wählen Sie einen Druckbereich unter 30mmHg und erhöhen den Druck Schritt für Schritt.



## 7.1 Informationen über mögliche elektromagnetische Störungen

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte der Norm IEC EN 60601-1-1-2 für medizinische Geräte. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen sicher.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemässer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung, Störungen bei anderen Geräten in der Nähe verursacht. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen bei anderen Geräten, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen - die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Massnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrössern Sie den Abstand zwischen den Geräten.
- Schliessen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des anderen Gerätes versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker.

## 7.2 WEE Kennzeichnung



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um der Umwelt, bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden, entsorgen Sie dieses Gerät bitte über eine geeignete Sammelstelle (Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten) oder senden das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

## 7.3 Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen

Betriebs- bedingungen	Temperatur (°C)	0-40
	Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10-90
	Luftdruck (hPa)	700-1060
Transport und Lagerung	Temperatur (°C)	20-60
	Relative Luftfeuchtigkeit (%)	0-90
	Luftdruck (hPa)	500-1060

## 7.4 Abbruch der Behandlung

### ✘ Brechen Sie die Anwendung bei folgenden Indikationen ab:

1. Bei Atembeschwerden oder Schwindel.
2. Wenn Sie an einem Körperteil zu starke Kompression spüren.
3. Bei Schmerzen während der Anwendung.
4. Bei Lähmung oder Juckreiz.
5. Wenn Sie während der Anwendung ein unwohles Gefühl verspüren.

## 7.5 Empfehlung

- ✘ Sollte nach dem Gebrauch des Gerätes ein Schwächegefühl auftreten ist es aufgrund der Tatsache, dass der Kunde die Kompression nicht gewöhnt ist. In diesem Fall verzichten Sie für einige Zeit auf die Anwendung des Gerätes und verwenden es danach streng nach den Anweisungen des Arztes.

# 8. Fehler

## 8.1 Fehlerdiagnosen

Problem	Kontrollpunkte
Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ist das Gerät korrekt angeschlossen?</li><li>- Ist die Spannung korrekt?</li><li>- Gab es einen Kurzschluss?</li><li>- Sicherung überprüft?</li></ul>
Keine Funktion nach dem Einschalten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gerät aus- und wieder einschalten.</li><li>- Stromverbindung überprüfen.</li></ul>
Ungewöhnliche Betriebsgeräusche	<ul style="list-style-type: none"><li>- Steht das Gerät richtig?</li><li>- Befinden sich Teile oder Staub im Kompressor?</li></ul>
Keine Kompression	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ist der Druckluftschlauch geknickt?</li><li>- Ist der Schlauch korrekt mit dem Steuergerät verbunden?</li></ul>
Fehlender Druckaufbau in der nächsten Druckkammer nach mehr als 90 Sek. Betriebsdauer	<ul style="list-style-type: none"><li>- Luftkammer defekt? Tritt Luft aus? Überprüfen Sie die Manschette und Verbindung auf äusserliche Beschädigung.</li><li>- Der Druckluftsensor erkennt Beschädigungen der Manschette oder Luftlecks und stoppt die Kammer für 1 Min. bevor er zum nächsten Schritt geht.</li></ul>










Daesung MAREF tut sein Bestes um die Qualität ihrer Produkte zu verbessern und bemüht sich den Benutzern Hilfe zu bieten.

In den folgenden Fällen ist es nicht möglich, das Gerät gratis zu reparieren, auch während der Garantiezeit:

1. Defekte oder Schäden aufgrund von Transport, Herunterfallen, Stößen usw. nach dem Kauf des Produktes.
2. Defekte aufgrund falscher Behandlung, eigenmächtiger Reparaturen oder Veränderungen.
3. Defekte aufgrund falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zustande kommt.
4. Manschetten sind Verbrauchsmaterial.

Garantiezeit: 1 Jahr auf das Gerät  
2 Monate auf Zubehör

HINWEIS: Manschetten sind Verbrauchsprodukte

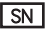 <b>MANUFACTURER</b>	<b>DAESUNG MAREF CO., LTD.</b> 298-24, Gongdan-ro, Gunpo-shi, Geonggi-do, 435-862, Korea Tel : +82 31 459 7211 Fax : +82 31 459 7215
 <b>EC REP IN THE EC</b>	<b>SUPPLY MEDICAL SERVICE</b> 18, CHEMIN DES COURSES 31100 TOULOUSE, FRANCE Tel : +33 (0)5 3450 4455 Fax : +33 (0)5 3450 4461
Model: Lympha-sys9 Weight: 2kg (only body) Dimension: 260(W) x 160 (D) x 120 (H) mm Power consumption: 50VA Power source: <input checked="" type="checkbox"/> 230V-, 50/60Hz Place: Indoors	   
<b>Made in Korea</b>	
 <b>IPX0</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• When the problem happens, stop the operation immediately, then turn a power switch off.</li> <li>• When the machine is unfit for body, please stop using a machine.</li> <li>• The electricity is suddenly off, separate hoses from pad and eliminate the air.</li> <li>• Do not use under the high temperature places as sauna, bathroom or the place where humidity is very high.</li> <li>• Do not connect body with another machine or modify absolutely.</li> <li>• Plug off a power cord from socket when you don't use.</li> <li>• See accompanying documents.</li> <li>• To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.</li> </ul>	
 <b>DATE OF MANUFACTURE</b>	 <b>SERIAL NUMBER</b>

# 10. Anwendungsprotokoll (Übersicht)

# AROSHA

LX9



Fall	Dauer der Behandlung	Zu wählende Funktion (mmHg)	Druck (mmHg)	Geschwindigkeit	Empfohlene Manschetten
Fibröse Cellulite	30 ÷ 35 Min.	B	30~60mmHg	3	Drainage Set oder Bauch-/Hüftmanschette
Oedematöse Cellulite	40 Min.	B	30~40mmHg	3	Drainage Set oder Bauch-/Hüftmanschette
Adipositas	30 ÷ 35 Min.	B	30~50mmHg	3	Drainage Set oder Bauch-/Hüftmanschette
Lymphdrainage komplett	35 ÷ 40 Min.	B	30~40mmHg	3	Drainage set
Teil-Lymphdrainage	30 Min.	B	30~40mmHg	3	Basic Set
Entschlackung	30 Min.	B	40~60mmHg	3	Drainage Set
Verbesserung der Durchblutung	30 Min.	C	40~60mmHg	3 ÷ 4	Drainage Set
Elastische Haut	30 Min.	C	40~60mmHg	3 ÷ 4	Basic Set, Drainage Set
Antistress Behandlung	20 ÷ 25 Min.	C	30~50mmHg	3 ÷ 5	Basic Set oder Drainage Set
Massage	30 Min.	A	60~80mmHg	2	Basic Set, Drainage Set
Kalte Hände und Füße	25 ÷ 30 Min.	A	40~60mmHg	3 ÷ 4	Basic Set
Gymnastik-Effekt	20 Min.	A	40~60mmHg	3 ÷ 4	Basic Set oder Drainage Set



# AROSHA

LX9

